

## まもるんカメラ



セット内容：本体・USB カメラ2台・専用固定ホルダー2セット・ACアダプター  
※ナースコール接続ケーブル（オプション）

### ■導入費用：（月額レンタルプラン）

・初期費用（ソフトウェア設定費用など）	初回のみ	17,600 円（税込）
・月額費用（システム手数料、保守費用など）	1か月	5,500 円（税込）

一般仕様	
寸法・重量	本体ユニット：95×115×27mm 174g
液晶画面	1.8インチ 128×160 RGB TFT LCD
電源ポート	USB Type-C
動作環境	温度10℃～40℃ 湿度：35～80%RH（結露なきこと）
保管環境	温度0℃～40℃ 湿度：10～80%RH（結露なきこと）
防水性	無し（IPXO）

機能	
動体検出	カメラ映像に映る特定マークをリアルタイムに検出
検出範囲	各カメラ前方 約0.5～1.8m（映像内の範囲）
ナースコール連携	異常検知時にナースコールシステムへ即時通知
デュアルカメラ監視	2カメラで広角監視 ※シングルカメラ運用も可能

製造・販売元

 株式会社 アワジテック

[本社]  
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地3-1-14  
TEL.078-367-8820（代） FAX.078-367-8850

[兵庫事務所]  
〒652-0816 神戸市兵庫区永沢町4-2-29（特殊センサー事業部）  
TEL.078-367-8830（代） FAX.078-367-8850  
URL. <http://awaji-tec.com>

販売店

画像AIで安全・安心

# まもるんカメラ

画像AI×センサーで実現する、  
新発想の見守り。



✓ 自己抜去に及ぶ動作を、  
画像AI×センサーですばやく検知。

✓ すぐにナースコールでお知らせ。  
医療スタッフの負担軽減を実現します。

特許取得済

 株式会社 アワジテック

# まもるんカメラとは

画像AI  
×  
センサー

まもるんカメラは経鼻胃管時における患者の行動を画像AIが見守ります。  
異常行動が見られるとナースコールで即座にお知らせします。

現状、経鼻胃管時等の抜管対策はミトンなど専用の防止器具の装着、スタッフの見守り強化などの対策のみですが、まもるんカメラを導入することで抜管のリスクを最小限に抑え、医療スタッフの負担軽減と患者の安全を提供します。



(まもるんカメラ本体)



メインシール



サブシール

専用マークを  
画像AIが自動検知。




(USB カメラ)



## Pattern 01 メインシールが手の動作により隠れるパターン

経鼻胃管の挿管部付近へセッティングした「メインシール」が、手の動作により、一定期間隠れた状態が継続すると、自己抜去発生の前触れとして感知し、ナースコールへ警報・異常のお知らせをします。

メインシールを認識中

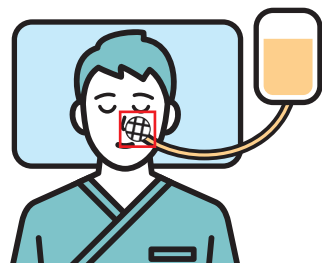

メインシールが手で隠れる




お知らせ

## Pattern 02 メインシールとサブシールが近づくパターン

経鼻胃管の挿管部付近へセッティングした「メインシール」が、手の動作により、一定期間「サブシール」と接近した状態が継続すると、自己抜去発生の前触れとして感知し、ナースコールへ警報・異常のお知らせをします。

メインシール・サブシールを認識中

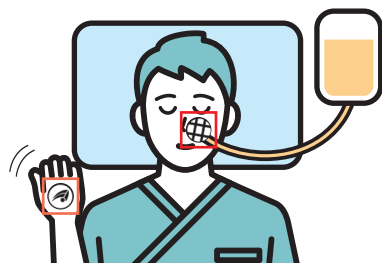

メインシールとサブシールが接近



お知らせ

## 「まもるんカメラ」の機能紹介

### まもるんカメラの4つのポイント

#### Point 01 操作は電源を入れるだけ



電源ケーブルを挿し込むと、自動でシステムが起動します。

#### Point 02 カメラが自動でマーキング



2つのカメラがターゲットシールを自動で認識、マーキングを開始します。

#### Point 03 起動・終了時間、警報時の時間を記録



自己抜去が起きてしまう、または起きる予兆の見られる記録を残すことで、“次”に備え、二次被害の防止対策となります。

#### Point 04 自由なカスタムも可能



エラー発生までの時間数、ナースコール作動までの時間などを自由にカスタムできます。患者様に合わせた設定環境で、事故防止をより強化させます。

### まもるんカメラは患者様のプライバシーと安全を保護します

- ☒ ナースコール作動時のみ画像を保存
- ☒ 映像での録画機能はありません
- ☒ ログは一定期間後自動削除されます

